


ヘッドはエンドメイト TCとタスカル ウィズに接続できます。全て135℃までの温度でオートクレーブが可能 135℃
15分

エンド用

- 製品名 MP-F16R 製品番号 Y110-096 標準価格 ¥33,500
- 製品名 MP-F4R 製品番号 Y110-047 標準価格 ¥30,500
- ミニヘッド • 360°回転 • 減速 16:1 / 4:1 • Ni-Tiファイル用(2.35)
- プッシュボタン式チャック

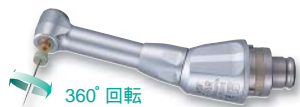

360°回転

- 製品名 MPA-F16R 製品番号 Y110-097 標準価格 ¥43,500
- 製品名 MPA-F4R 製品番号 Y110-051 標準価格 ¥40,500
- 根管長測定器接続用(ロングシャック用) • ミニヘッド • 360°回転
- 減速 16:1 / 4:1 • Ni-Tiファイル用(2.35) • プッシュボタン式チャック



360°回転

- 製品名 MPAS-F16R 製品番号 Y110-098 標準価格 ¥43,500
- 製品名 MPAS-F4R 製品番号 Y110-052 標準価格 ¥40,500
- 根管長測定器接続用(ショートシャック用) • ミニヘッド • 360°回転
- 減速 16:1 / 4:1 • Ni-Tiファイル用(2.35) • プッシュボタン式チャック



360°回転

- 製品名 NML-F16R 製品番号 Y110-019 標準価格 ¥31,000
- ミニヘッド • 360°回転 • 減速 16:1 • Ni-Tiファイル用(2.35) • ラッチ式



360°回転

製品名の左にある○印は、ヘッドの減速比を ● グレー = 減速 16:1 示しています。掲載写真は全て減速 16:1 ● グリーン = 減速 4:1

PMTC用


- 製品名 ARS-F4R 製品番号 Y110-017 標準価格 ¥24,500
- プロフィー用 • スクリュー式 • 減速 4:1



- 製品名 NAC-F4R 製品番号 Y110-020 標準価格 ¥26,000
- プロフィー用 • ラッチ式 • コントラバー用(2.35) • 減速 4:1



- 製品名 EVA-F 製品番号 Y110-016 標準価格 ¥23,000
- 上下運動ヘッド • エバチップ用 • 等速 1:1

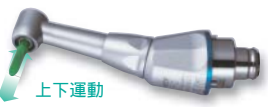

上下運動




- 製品名 PR-F 製品番号 H209 標準価格 ¥13,000
- ディスポーザブル プロフィーヘッド用 • 減速 4:1




根管長測定器接続用ヘッド

MPA / MPASは根管長測定器に接続してご使用いただくためのエンドメイトTC用ヘッドです。エンドメイトTCと根管長測定器との併用で、より快適・簡単・安全・的確な診療を可能にします。ヘッドは135℃でオートクレーブ可能です。

- 選べる2つのヘッド
Ni-Tiファイルのシャック長に応じて、2種類のヘッドから選択できます。

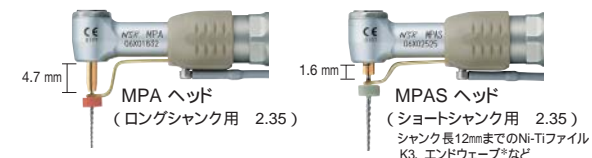

- 接続・解除の方法 (写真はMPAヘッド)

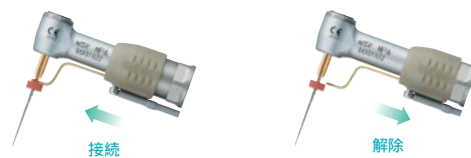

* K3は、Sybron Dental Specialities Inc.の登録商標です。
エンドウェアは、J.MORITA CORPORATIONの登録商標です。



製品名 エンドメイトTC モーター 製品番号 E249 標準価格 ¥68,500

- 回転速度: 2,000 ~ 10,000 min⁻¹
- トルクコントロール機能 • オートリバース機能



製品名 タスカルウィズ モーター 製品番号 E229 標準価格 ¥42,500

- 回転速度: 2,000 ~ 10,000 min⁻¹



製品名	製品番号	標準価格
単4ニッケル水素電池セット	Y900-103	¥950

- 2本入り
- 充電式以外のアルカリ、マンガン電池などは使用できません。写真電池はサンプルです。



製品名	製品番号	標準価格
NE140チャージャー ACコード付	Y140-986	¥26,000

- 電源: AC 100V 50/60 Hz
- 充電時間 / 連続使用時間:
充電1.5時間 / 連続使用1時間(定格負荷)
- タスカル ウィズとエンドメイト TCの両方に使用できます。

《ギアのみ》

製品名	製品番号	標準価格	製品名	製品番号	標準価格
FC 等速 1:1	C873	¥10,500	F16R 減速 16:1	C871	¥15,500
F4R 減速 4:1	C872	¥12,500			

左記ヘッドとギアの組み合わせ以外にも自由な組み合わせができます。詳細はお取引の販売店までお問い合わせください。左記ヘッドはタスカル7およびエンドメイト2に互換性がありません。



エンドメイト TC & タスカル ウィズ
MULTI-PURPOSE CORDLESS HANDPIECES

ENDO-MATE TC
TASKAL Wizard

precision technology-in action



株式会社 **ナカニシ** www.nsk-nakanishi.co.jp

本社・工場 | 〒322-8666
栃木県鹿沼市下日向700
TEL: 0289(64)3380 FAX: 0289(62)5636

東京事務所 | 〒110-0005
東京都台東区上野1-13-3 MYビル6F
TEL: 03(3835)2907 FAX: 03(3835)4332

大阪事務所 | 〒532-0003
大阪市淀川区宮原4-1-45新大阪八千代ビル6F
TEL: 06(6350)7217 FAX: 06(6350)7218

製品に関するお問い合わせはこちらまで
受付時間9:00 ~ 17:00(土・日祝祭日を除く)
携帯・PHSからもご利用いただけます

ナカニシ コール
0120-7242-56

本カタログに記載しております標準価格に消費税は含まれておりません。
正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。
仕様及び形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

PR-D203 Ver.8 08.02.20.A

Powerful Partners®

正確で微細なトルクコントロールができる
軽量・コンパクトなコードレスハンドピース
操作性を重視し、「軽く、細く、短く、バランス良く」
をコンセプトに開発されました。



素早く正確なコントロール
スイッチは全てハンドピース上部に設置され、正確に操作できます。

軽量・コンパクト
軽量、コンパクトで手にフィットするデザイン


**ON / OFFの切換えは
手元でOK**
使い勝手に合わせて2通りの
ON / OFF動作²が選択できます。

**プッシュボタン式
超ミニヘッド**
超ミニヘッドにより口腔内の
高い視野を確保し、より正確な
治療を可能にします。

**市販電池なので、その場で
交換可能**
充電式単4電池(AAA)ニッケル水素電池
を使用。¹

クイックジョイント
ヘッドがクイックジョイントの
ため様々なヘッドが簡単に
交換できます。

6ポジション式ヘッド
ヘッドの取り付け角度は6通り。部位に
応じてヘッドの向きを変えたり、押しや
すい位置にON / OFFボタンをセットで
きるため、操作性が大幅に向上します。

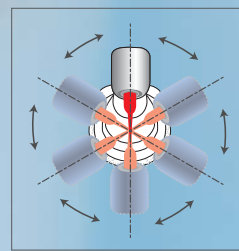

トルクコントロールとオートリバース(エンドメイト TCのみ)

ニッケルチタン(Ni-Ti)ファイルや番手に合わせて、5段階のトルク設定が可能。また、設定したトルク値を超えるとオートリバースがかかり、負荷がなくなるまで逆回転をした後、正回転に戻ります。(オートリバース後、負荷がなくなったら停止するモードもあります。)

9段階のスピードセッティング

接続したギア比によって、右の表のように9段階の
回転速度から選択することができます。

ギア比	回転速度(min ⁻¹)								
1 : 1	2,000	3,000	4,000	5,000	6,000	7,000	8,000	9,000	10,000
4 : 1	500	750	1,000	1,250	1,500	1,750	2,000	2,250	2,500
16 : 1	125	190	250	310	375	440	500	560	625

上記の表は選択されたギアで設定可能な回転速度を表しています。

1 1.5時間の充電で1時間の連続使用が可能です。
2 A: 押し続けている間 ON、離すと OFF。B: 1度押しすと ON、もう1度押しすと OFF。

エンドメイト TC
ENDO-MATE TC

トルクコントロール & オートリバース

エンド用 & PMTC用 125 ~ 10,000 min⁻¹ ³

エンドメイト TCは、ナカニシのマイクロモーター技術とマイコン技術により開発されたエンド用 / PMTC用コードレスハンドピースです。各社のニッケルチタン(Ni-Ti)ファイルや番手に合わせて5段階のトルク設定が可能。回転中ファイルにその設定したトルク以上の負荷がかかると、自動的に逆回転(オートリバース)してファイルの破損を防止します。また術者は9段階のスピードから治療に合ったスピードを簡単に選択できます。ヘッドを交換することで125 ~ 10,000 min⁻¹の広範囲のスピードを実現し、エンド治療からPMTC(プロフィー、エバ)をカバーします。

エンドメイト TC 標準セット

製品名 エンドメイト TC 製品番号 Y141-160 標準価格 ¥128,000
標準セット


セット内容
• エンドメイト TC モーター • MP-F16R ヘッド • チャージャー

エンドメイト TC サブセット(ヘッド無し)

製品名 エンドメイト TC 製品番号 Y140-983 標準価格 ¥94,500
サブセット

セット内容
• エンドメイト TC モーター • チャージャー

医療機器承認番号 21600BZ200185000号 管理医療機器 特定保守管理医療機器

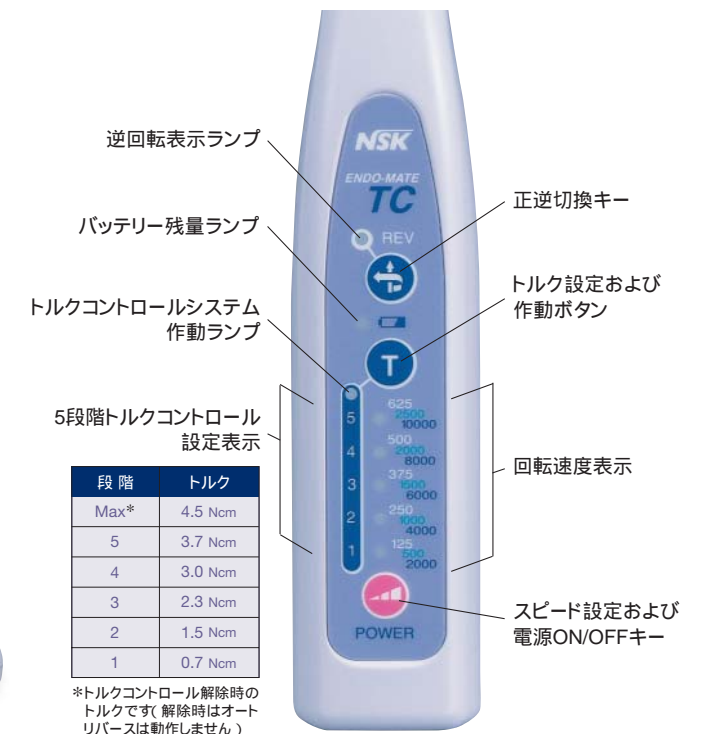

5段階トルクコントロール
設定表示

段階	トルク
Max*	4.5 Ncm
5	3.7 Ncm
4	3.0 Ncm
3	2.3 Ncm
2	1.5 Ncm
1	0.7 Ncm

*トルクコントロール解除時のトルクです(解除時はオートリバースは動作しません)

タスカル ウィズ
TASKAL Wizard

トルクコントロール無し
PMTC用 125 ~ 10,000 min⁻¹ ³

タスカル ウィズは、トルクコントロール機能を除いて、エンドメイト TCと同等の機能を持ったPMTC用コードレスハンドピースです。特に、歯科衛生士の方々の意見を取り入れ、操作性を重視し、軽く、細く、バランスの良いハンドピースデザインに仕上げました。比較的時間のかかるPMTCの歯面研磨(プロフィー)時でも、手の疲労を軽減します。ヘッドを交換することで125 ~ 10,000 min⁻¹の広範囲のスピードを実現し、PMTC(プロフィー、エバ)をカバーします。

タスカル ウィズ 標準セット

製品名 タスカル ウィズ 製品番号 Y140-974 標準価格 ¥93,000
標準セット

セット内容
• タスカル ウィズ モーター • ARS-F4R ヘッド • チャージャー

タスカル ウィズ サブセット(ヘッド無し)

製品名 タスカル ウィズ 製品番号 Y140-980 標準価格 ¥68,500
サブセット

セット内容
• タスカル ウィズ モーター • チャージャー

医療機器承認番号 21400BZ200445000号 管理医療機器 特定保守管理医療機器



3 3種類のギア比(等速 1:1、減速 4:1、減速16:1)のヘッド使用時可能な回転速度です。